

yellowBAND

BANDAŻ KOHEZYJNY - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS

- Jednowarstwowa, włókninowa opaska
- Kohezyjna – przyczepi się sama do siebie (nie ma potrzeby stosowania zapinek), nie przyczepia się do skóry, włosów itp.
- Oddychająca
- Opaska nie posiada właściwości leczniczych, jest produktem wspomagającym proces leczenia
- Może być dzielona na mniejsze odcinki, możliwość rozerwania w rękach, nie ma potrzeby używania nożyczek
- Dostępna w kilku kolorach
- Dostępne rozmiary: 5cm x 4,5m; 7,5cm x 4,5m; 10cm x 4,5m
- Opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem, odwinieciem i zawilgoceniem, na foli nadrukowane są niezbędne informacje dotyczące produktu
- Nie zawiera lateksu
- Produkt niejatówy

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie opatrunku, zwłaszcza w miejscach, w których tradycyjny bandaż mógłby się zsuwać
- Mocowanie szyn unieruchamiających
- Tworzenie opatrunku kompresyjnego
- Zmniejszanie zakresu ruchu stawów po urazie



INSTRUKCJA UŻYCIA

- Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i osuszone.
- Należy odpowiednio dobrać rozmiar bandaża do miejsca aplikacji.
- Opatrunek pierwotny, który bandaż ma podtrzymywać powinien być założony bezpośrednio na ranę zgodnie z zasadami aseptyki. Jeśli bandaż nie jest wykorzystywany do podtrzymania opatrunku należy pominąć ten punkt.
- Wyjąć bandaż z opakowania.
- Założyć bandaż na miejscu docelowym tak, aby jego kolejne warstwy zachodziły na siebie, co pozwoli na utrzymywanie się bandaża poprzez działanie kohezyjne.
- Jeśli bandaż jest zbyt długi, należy przyciąć go do pożądanej długości.
- Wolny koniec bandaża należy docisnąć palcami do poprzednich warstw opatrunku, upewniając się, że przylegają do siebie i tworzą bezpieczne połączenie.
- Skontrolować, czy opatrunek nie uciska zbyt mocno i nie pojawiają się cechy niedokrwienia takie jak błądź, czy zasinienie.
- Bandaż powinien być zmieniany zgodnie z instrukcją dla opatrunku pierwotnego. Jeśli opatrunek nie służy do przytrzymywania opatrunku jałowego, powinien być zmieniony kiedy ulegnie uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nie rzadziej niż codziennie.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU

- Wyrób przeznaczony do jednorazowego użytku, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu
- Wyrób niejatówy, nie stosować bezpośrednio na rany czy uszkodzony naskórek.
- Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Opatrunek powinien być zakładany z zachowaniem zasad higieny.
- W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, wysypka, należy usunąć opatrunek i przerwać jego stosowanie.
- Miejsce aplikacji należy obserwować pod kątem możliwości wystąpienia infekcji (może objawiać bólem, zaczerwienieniem, obrzękiem wokół miejsca aplikacji lub gorączką). Jeśli w trakcie stosowania opatrunku wystąpi podejrzenie infekcji należy usunąć taśmę i dokonać oględzin miejsca aplikacji w celu podjęcia dalszych decyzji terapeutycznych
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest stała temperatura w przedziale od +5 do +35 °C, a wilgotność od 35% do 70%.

REF	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE KARTON
YCB-545-S	5 cm x 4,5 m	cielisty	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-Y	5 cm x 4,5 m	żółty	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-G	5 cm x 4,5 m	zielony	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-X	5 cm x 4,5 m	czarny	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-R	5 cm x 4,5 m	czerwony	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-B	5 cm x 4,5 m	niebieski	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-W	5 cm x 4,5 m	biały	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-545-BC	5 cm x 4,5 m	niebieski moro	1 szt.	12 x 24 szt.
YCB-7545-Y	7,5 cm x 4,5 m	żółty	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-7545-X	7,5 cm x 4,5 m	czarny	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-7545-B	5 cm x 4,5 m	niebieski	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-7545-W	7,5 cm x 4,5 m	biały	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-7545-R	7,5 cm x 4,5 m	czerwony	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-7545-S	7,5 cm x 4,5 m	cielisty	1 szt.	16 x 12 szt.
YCB-1045-X	10 cm x 4,5 m	czarny	1 szt.	12 x 12 szt.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

	nazwa i adres wytwórcy		wyrób niesterylny		przechowywanie: chronić przed promieniami słonecznymi
	znak CE		wyrób jednorazowego użytku		przechowywanie: chronić przed wilgocią
	numer LOT określający numer partii produkcyjnej		data przydatności do użycia podana w sekwencji: RRRR-MM-DD		ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania
	numer katalogowy wyrobu		wyrób nie zawiera lateksu		wilgotność względna przechowywania
					opakowanie nadające się do recyklingu